


VITAEFLO



Une solution innovante pour l'aspiration des fumées chirurgicales

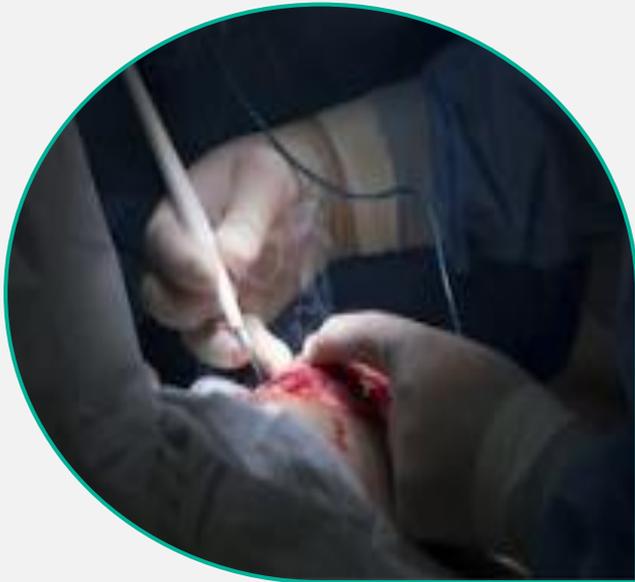

Une unité **mobile, silencieuse** avec option **Start & Stop**
pour capter les odeurs et les fumées en bloc opératoire



ASPIRATION DES FUMÉES CHIRURGICALES UN ENJEU POUR LA SANTÉ DES PROFESSIONNELS EXPOSÉS

Risques induits par les fumées chirurgicales

Emissions de substances diverses

Éléments biologiques actifs
Éléments cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques
Gaz, vapeur

Effets toxiques

Irritation des yeux et des voies respiratoires, céphalées, asthénie, nausées, gêne olfactive

AVEC LE DISPOSITIF

VITAEFLO

Captage des fumées au plus proche de la source

Grâce au bistouri raccordé directement au préfiltre à charbon actif

Odeurs canalisées

Préfiltre au charbon actif couplé à un filtre principal pour réduire les odeurs désagréables

Utilisation silencieuse


Un système VENTURI couplé à un silencieux pour optimiser l'aspiration et minimiser les nuisances sonores

Option Start & Stop

Une aspiration active uniquement au déclenchement du bistouri

LA MACHINE

CE

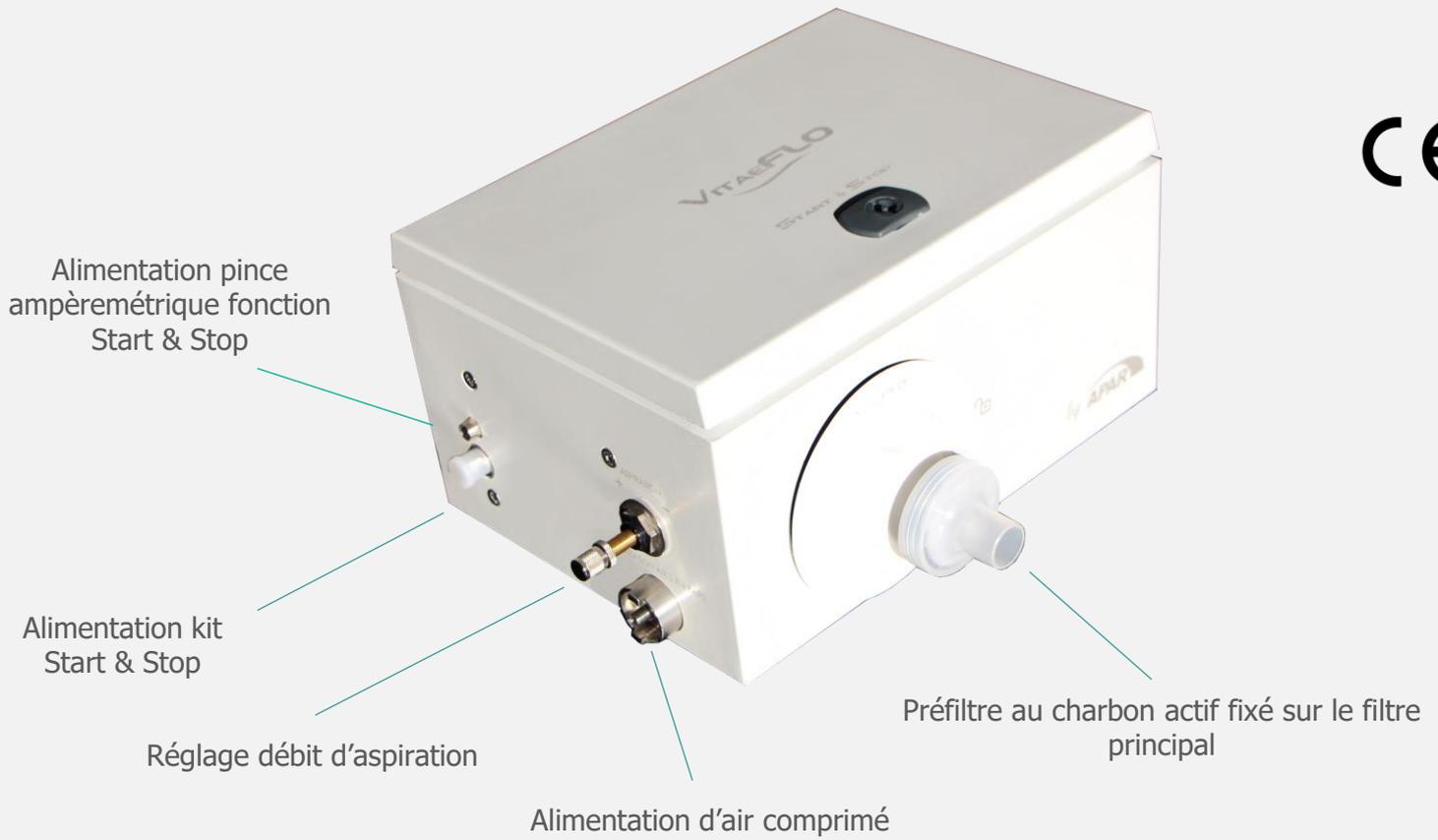

LES ACCESSOIRES

Préfiltre au charbon actif



Filtre Principal



Pince ampèremétrique système Start & Stop



Flexible air médical




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Système Venturi

Puissance absorbée	0,8VA en attente et 24V dc en utilisation
Volume d'air aspiré	102 litres / minute
Aspiration maximale	120 LPM
Niveau sonore	Inférieur à 56 dBA
Alimentation	Pneumatique réseau 6 bars Pas d'alimentation électrique excepté pour l'option Start & Stop
Filtration principale	Norme H13 Filtre à air à particules haute efficacité 99,95% des particules de 0,1 µm à 0,3 µm retenue en 1 passage
Filtration auxiliaire	Filtre à charbon actif pour la neutralisation des odeurs
Poids filtres inclus	5 kg
Dimensions	300 x 220 x 160 mm
Matériau du coffret	Polyester
Garantie	1 an en échange standard hors filtre principal ou auxiliaire et tuyau d'alimentation air comprimé

Système breveté et conforme aux normes CE

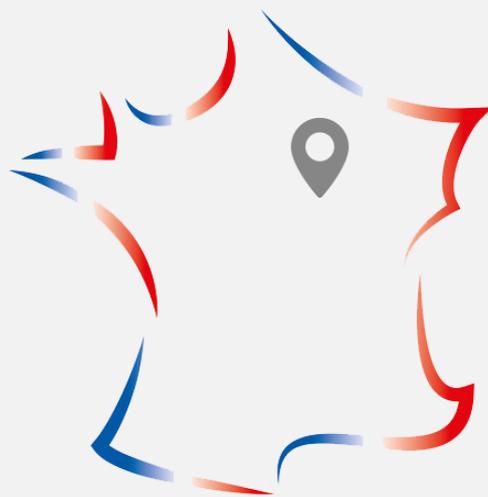

POUR PLUS D'INFORMATIONS



+33 (0)1 64 42 53 60



contact@c2lappar.com



WWW.C2L-APAR.COM

C2L APAR | 2-4 Rue Louis Armand | ZI Le Closeau | 77220 TOURNAN-EN-BRIE | FRANCE